

Алгоритм визначення групи крові за системою АВ0 методом цоліклонів.

1. Будь ласка, використовуйте індивідуальний захист (надіньте рукавички).

2. Виберіть необхідне обладнання і матеріали для визначення групи крові за системою АВ0 методом Цоліклонів:

- планшет для визначення групи крові,
- пробірка маркована "Кров пацієнта",
- флакони з Цоліклонами анти-А і анти-В,
- скляна паличка.

Будь ласка, будьте уважні: не вибирайте зайві матеріали і обладнання!

3. Озвучте вірну послідовність дій, які виконуєте:

- в планшетку для визначення групи крові в лунки відповідно маркування наношу по краплині Цоліклонів анти-А і анти-В,

- в окрему лунку вношу краплю крові пацієнта,

- перемішую кров з Цоліклонами в співвідношенні 10:1 (Цоліклони: кров) за допомогою скляної палички.

4. Озвучте час реєстрації реакції аглютинації, який становить 3-5 хвилин.

5. Визначте групу крові по зображенню на комп'ютері і запишіть її на папері.

Успіхів!